

Руководство по эксплуатации Зонд «Юнона»: урогенитальный флокированный

Описание

Зонд урогенитальный флокированный представляет собой полимерную рукоятку с размещенной в ней транспортной колбой с одной стороны и гибкую полимерную рабочую часть покрытую флоком – с другой.

Показания

Взятие материала с поверхности слизистых оболочек (из уретры, цервикального канала, со слизистой влагалища, ротовой полости, прямой кишки).

Противопоказания: не имеется.

Предостережения:


- недопустимо повторное применение инструмента;
- недопустимо применение инструмента при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки;
- недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на этикетке;
- применять зонд урогенитальный флокированный необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Методика применения

1. Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и извлечь зонд урогенитальный флокированный.

2. Рабочей частью инструмента скользящими движениями выполнить взятие материала с участка слизистой. При взятии материала из уретры или цервикального канала рабочую часть инструмента вводят на длину флокированного участка и выполняют несколько вращений.

3. Собранный материал переносят на предметное стекло («прокатывая» флокированную часть инструмента по стеклу) или в транспортную емкость. При необходимости рабочая часть зонда может быть отломана и помещена либо в транспортную среду, либо в транспортную колбу в рукоятке зонда.

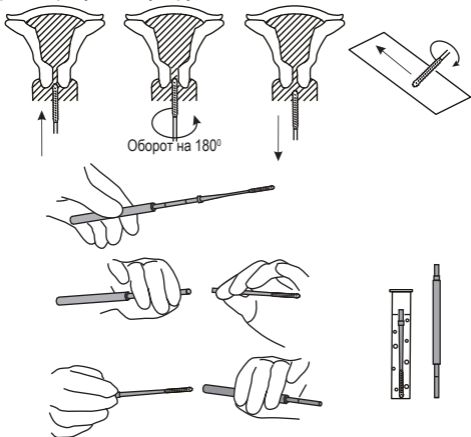

После использования зонд подлежит утилизации согласно установленным правилам обращения с медицинскими отходами.

Изготовитель

ЗАО «Медицинское предприятие Сатург»

пр-т Людникова, 13- 413, г. Витебск,

Республика Беларусь, 210023, тел.: +375 (212) 62-32-33



Медицинское предприятие

Сатург

www.simurg-mp.com