


BY RU Руководство по эксплуатации
шпателя Эйера

ОПИСАНИЕ

Шпатель Эйера – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде лопаток, отличающиеся по размерам.

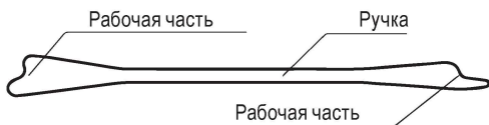

ПОКАЗАНИЯ

Забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований в гинекологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не имеется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Недопустимо повторное применение инструмента.
Недопустимо применение инструмента при нарушении целостности потребительской (конечной) упаковки.
Недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на упаковке.
Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять шпатель Эйера необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Шпатель Эйера должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Забор материала шпателем Эйера должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения:

1. Вскрыть потребительскую (конечную) упаковку и извлечь инструмент.
2. Не прилагая значительного усилия, легкими скользящими движениями выполнить забор материала.
3. Собранный на рабочих частях шпателя материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований.
4. Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



Медицинское предприятие

Симург

www.simurg-mp.com

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
пр-т Людникова, 13-413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ ЗА
КАЧЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ООО «Медицинское предприятие «Симург»
199178, Санкт-Петербург, линия 18-я В.О., д.29, лит. 3,
офис А 417, тел./факс: (812) 332 91 70

Дата пересмотра текста: 24.05.2018

0240802100052