

Руководство по эксплуатации зеркала гинекологического по Куско «Юнона» №№ 1/S, 2/M, 3/L

Зеркало гинекологическое по Куско – стерильное одноразовое двусторчатое зеркало. Зеркало состоит из верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора. Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90°. Зеркало выпускается в трех исполнениях с разной шириной створок из биологически инертного пластика.

зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 1/S	ширина створок – 20 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 2/M	ширина створок – 26 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 3/L	ширина створок – 32 мм

ПОКАЗАНИЯ: зеркало предназначено для расширения влагалища при осмотре слизистой оболочки влагалища, шейки матки и для обеспечения доступа к слизистой влагалища и шейки матки при выполнении различных лечебно-диагностических манипуляций.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не имеется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: недопустимо повторное применение инструмента. Инструмент одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Недопустимо применение инструмента при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки.

Недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на этикетке.

Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять зеркало гинекологическое по Куско необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Зеркало гинекологическое по Куско должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании зеркала гинекологического по Куско требуется соблюдение общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и извлечь зеркало.

2. Зеркало с сомкнутыми створками (рис. 1) в сагиттальной плоскости (при этом рукоятка инструмента обращена к левому или правому бедру пациентки) ввести во влагалище, затем развернуть створки во фронтальную плоскость (рукоятка инструмента обращена вниз или вверх).

3. Сжимая рукоятку инструмента, развести створки зеркала. Фиксацию створок в разведенном состоянии выполнить поворотом фиксатора на 90° по часовой стрелке (рис. 2).

4. При извлечении инструмента последовательность действий обратная (развернуть фиксатор в исходное положение, сомкнуть створки зеркала, развернуть створки зеркала в сагиттальную плоскость, извлечь инструмент).

5. Использованное зеркало после дезинфекции подлежит утилизации.

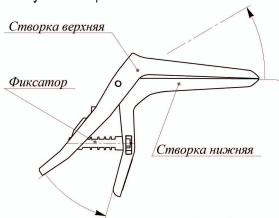


Рис. 1

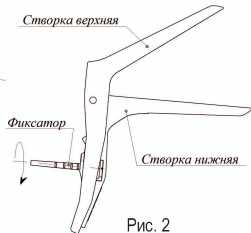


Рис. 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО "Медицинское предприятие Симург"
пр-т Людникова, 13-413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023
тел.: +375 (212) 62 32 33



Юнона
Медицинское предприятие
Симург
www.simurg-mp.com

Дата пересмотра текста: 19.10.2018
0240922602023